

본 제품은 동물용 의료기기임

Connect Easy,
Care More.
O'Pet Curv
By Bionet

Quick Guide

자세한 사용 절차는 제품 사용설명서를
참고하십시오.



구성품



패키지



O'Pet Curv
본체



일회용
접착 패드 2팩
(4매/1팩)





USB 충전
크래들




퀵가이드

O'Pet Curv 설명

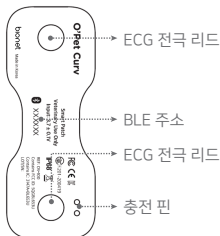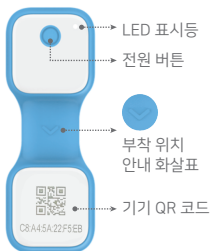


준비

1 접착 패드 준비

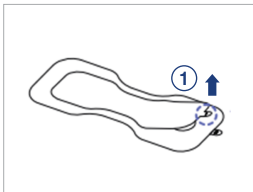

첫 번째 보호 필름을 제거합니다.

2 O'Pet Curv에 접착 패드 부착

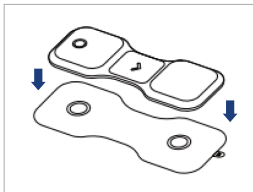


O'Pet Curv 본체에 접착 패드를 단단히 눌러 고정합니다.

3 반려동물에 접착 패드 부착



두 번째 보호 필름을 제거하고
반려동물의 가슴 부위에 부착합니다.

4 O'Pet Curv 고정

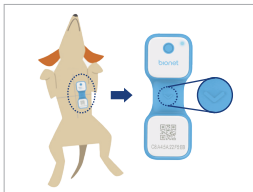


O'Pet Curv가 패드에 제대로 부착
되었는지 확인하고, 방향 화살표가
아래를 향하도록 합니다.



접착 패드를 붙이기 전, 해당 부위를 알코올로 소독하십시오.
필요하다면 털을 깎아 부착력을 높이십시오.

충전 방법

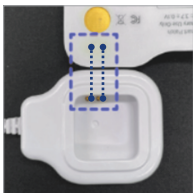

충전 중 : LED 깜빡임
완충 : LED 켜짐
(20분 유지 후 꺼짐)
완충시간 : 약 3시간


- 두 개의 충전 핀이 크래들의 충전 단자와 정확히 맞닿도록 정렬합니다.
- 충전 크래들을 닫으면 충전이 시작됩니다.

시작하기

1 O'Pet Link 앱 다운로드




2 새 프로필 생성

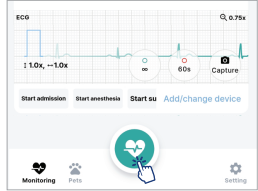

3 반려동물 프로필 등록

1. 반려동물 종류 선택 (개/고양이/기타)
2. 성별 선택 (수컷/암컷)
3. 등록 ID 입력
4. 반려동물 이름 및 보호자 이름 입력
5. 품종 입력
6. 나이 선택

▶ 완료 후 “프로필 저장”을 눌러 다음 단계로 이동합니다.


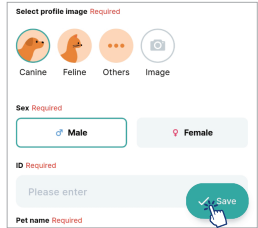


“긴급 모드”에서는 반려동물 프로필 등록 없이 기기 연결과 모니터링이 가능합니다.

4 알람 범위 설정 및 저장


- O'Pet Curv 선택
- 알람 사운드 ON/OFF 설정
- 반려동물 선택
- 심박수(HR), 호흡수(Resp), 체온(Skin Temp) 알람 범위를 설정

▶ 완료 후 “알람 범위 저장”을 눌러 다음 단계로 이동합니다.

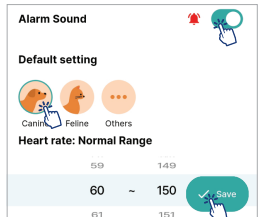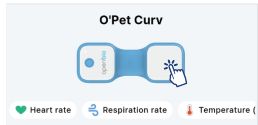


연결 & 모니터링

1 O'Pet Curv 검색 및 연결

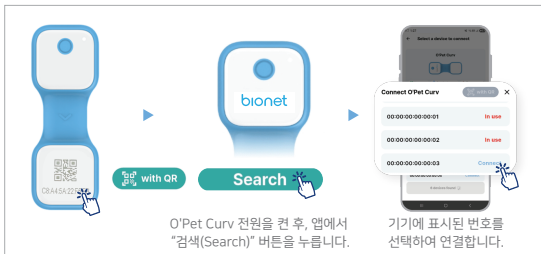


2 모니터링 시작

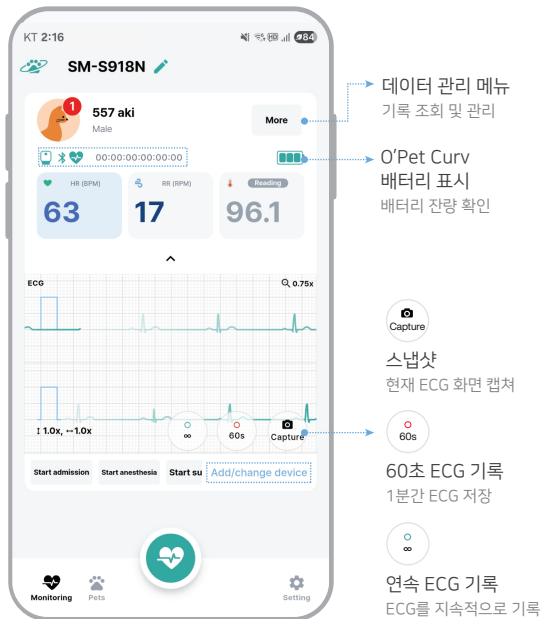


연결 & 모니터링

3 모니터링 화면 구성

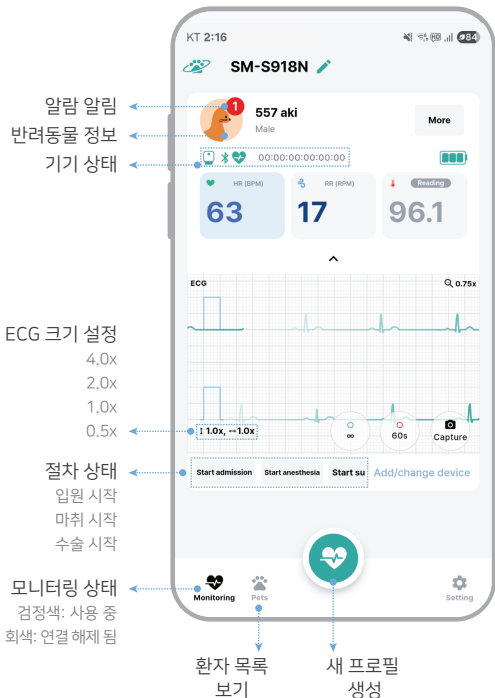

4 “더보기” 메뉴 열기

앱 하단의 “More” 탭을 눌러 데이터 관리 메뉴를 불러옵니다.

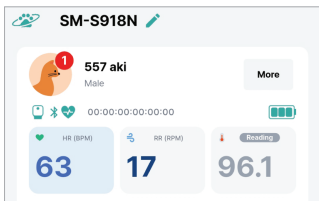

데이터 관리

More More 메뉴 (더보기)

More

Alarm setting

Vital sign trend

ECG records

Enter core temperature

Show full display

Show procedure buttons

Share monitoring

Update firmware Ver.1

Stop monitoring

알람 범위 조정

모든 파라미터의 그래프 및
표 형식 추세 확인

ECG 기록 조회

심부 체온 수동 입력


멀티 파라미터 모니터링
화면 전환

입원(Admission)
마취(Anesthesia)
수술(Surgery)

QR 코드 기반 원격 모니터링
공유 모드

모니터링 연결 종료

Vital sign trend

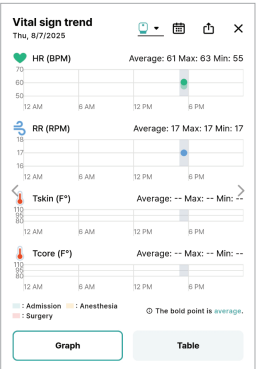

Vital sign trend

Thu, 8/7/2025

Record time	HR	RR	Temp (F°)
5:13 PM	60	17	96.1 (Skin)
5:14 PM	59	17	96.1 (Skin)
5:15 PM	62	17	96.1 (Skin)
5:17 PM	61	17	96.1 (Skin)
5:18 PM	62	17	96.1 (Skin)
5:19 PM	58	17	96.1 (Skin)
5:21 PM	58	17	96.1 (Skin)
5:21 PM	63	17	96.1 (Skin)
5:21 PM	58	17	96.1 (Skin)
5:22 PM	59	17	96.1 (Skin)
5:23 PM	58	17	96.1 (Skin)
5:24 PM	63	17	96.1 (Skin)

Admission

Anesthesia

Surgery

Delete


Add

Graph

Table

데이터 관리


▶ ECG 기록

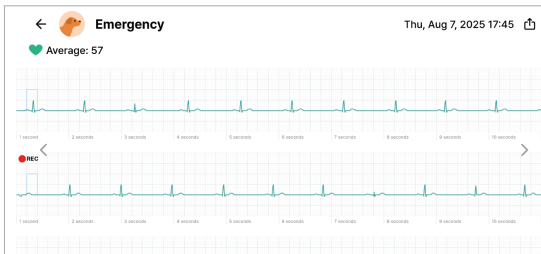

🌡️ 심부 체온 입력

The 'Core temperature' input form has a title bar with a close button (X). It displays a temperature range from 95 to 97 with a central input field showing '96.1' and the unit 'F°'. A teal 'Complete' button is at the bottom.

💚 전체 화면 보기

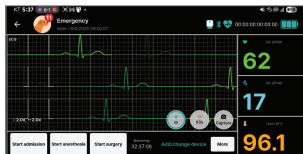

🔗 모니터링 공유

The 'Share monitoring' screen has a title bar with a close button (X). It features a QR code and the text 'Monitoring Emergency together'. Below the QR code, it says 'Please scan the QR code, or run the link below'. A teal button at the bottom contains the link 'https://epet-10.tcc.web.app/monitors/cv5VAjX...' and a share icon.

🔄 펌웨어 업데이트

The firmware update screen shows a blue device icon with the 'bionet' logo. Below it, the instructions read: 'Press the switch and click the "Start" button. Keep pressing the switch and the firmware update will be completed.' A large teal 'Start' button is at the bottom.

QR 코드를 스캔하거나 링크를 복사/붙여넣기 하여 원격 모니터링을 공유할 수 있습니다.

기기 전원을 켜 후 "Start" 버튼을 눌러 업데이트 할 수 있습니다.

○ 사용 전 주의사항

- O'Pet Curv가 충분히 충전되어 있는지 확인하십시오.
- 사용하는 모바일 기기의 배터리 전원이 충분한지 확인하십시오.
- 접착 패드를 부착하기 전에 O'Pet Curv의 전극 부위를 깨끗이 닦으십시오.
- 접착 패드의 유효기간을 확인하십시오.
- 제공된 정품 하이드로겔 패드만 사용하십시오.
- 앱 권한을 허용하고 O'Pet Link 앱에서 필요한 설정을 완료하십시오.

○ 사용 중 주의사항

- 물리적 장애물이나 거리로 인해 무선 통신이 불안정할 수 있습니다.
O'Pet Curv와 모바일 기기는 반경 약 5m 이내에서 사용하십시오.
- 강한 전자기장이 존재하는 환경에서는 사용을 피하십시오.
- Android 기기의 경우, 종료 시 반드시 Home 버튼을 눌러 앱을 종료하십시오.
Back 버튼을 누르면 Bluetooth 연결이 끊길 수 있습니다.
- Android 기기에서 앱 재연결 중 갑자기 종료될 경우, 기기를 재시작한 후 다시 연결해 보십시오.

○ 사용 후 주의사항

- 사용 후 반드시 전원을 꺼서 배터리 소모를 방지하십시오.
- 교차 오염을 방지하기 위해 사용 후 알코올로 O'Pet Curv를 소독하십시오.
- 접착 패드는 일회용입니다. 사용 후 지정된 폐기물 처리 구역에 버리십시오.

주소

(주) 바이오넷

서울특별시 구로구 디지털로31길 61, 5층
(구로동, 드림마크원데이터센터)

Tel: 02-6292-6410

FAX: 02-6499-7788

E-Mail: domestic.sales@ebionet.com

Website: www.ebionet.com/kor

O'Pet Central 사용 방법

